

# Monte-escalier HomeGlide

## Manuel de démarrage rapide

Ceci est un manuel de démarrage rapide. Vous devez lire le manuel complet de l'utilisateur, qui inclut des conseils et des instructions importantes !

### Ouverture du siège pour s'asseoir

1



Fauteuil, accoudoirs et cale-pieds.



Ceinture de sécurité

### Fonctionnement du monte-escalier

2



Pour monter ou pour descendre, déplacer la tige de commande dans le sens voulu.



Stationner toujours le monte-escalier sur un point de charge. (voir paragraphe 7).



Pivoter le siège.

- Pour des raisons de sécurité, il y a un léger temps d'attente entre l'utilisation de la tige de commande et le démarrage du monte-escalier.
- Orientez la tige de commande dans le sens du déplacement pendant tout le trajet.
- À la fin du rail, le monte-escalier s'arrête automatiquement.

### 3 Sortir du fauteuil en toute sécurité



Ceinture de sécurité



Se redresser.

### 4 Replier le fauteuil



Accoudoirs, fauteuil et cale-pieds.



### 5 Utiliser la télécommande



Déplacer le monte-escalier vers le haut ou vers le bas.



Toujours stationner le monte-escalier sur un point de charge (voir paragraphe 7).

- Pour des raisons de sécurité, il y a un léger temps d'attente entre l'utilisation de la télécommande et le démarrage du monte-escalier.
- Maintenir enfoncé le bouton pendant la totalité du déplacement.
- À la fin du rail, le monte-escalier s'arrête automatiquement.



Ne jamais débrancher la prise de courant. Utiliser l'interrupteur principal pour mettre en marche ou arrêter le monte-escalier.



Toujours stationner le monte-escalier sur un point de charge car il fonctionne sur batteries. Le monte-escalier s'arrête automatiquement quand il arrive sur un point de charge.

## Signaux en usage normal

### Signal

Un bip court.

Deux bips courts.

### Signification

- Le monte-escalier se met en marche.
- Ou il est appelé ou renvoyé par la commande d'appel et de renvoi.

Le monte-escalier a atteint sa position d'arrêt sur un contact de charge.

Signal	Signification	Solution
Bips rapides qui se renouvellent toutes les dix secondes.	Le monte-escalier n'est pas sur un contact de charge ou l'alimentation électrique est débranchée.	Ramenez le monte-escalier sur un contact de charge.
Bips rapides qui se répètent.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le monte-escalier a rencontré un obstacle et s'est arrêté.</li><li>- Le siège n'est pas correctement positionné</li><li>- Le monte-escalier est défaillant.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Éloignez-vous de l'obstacle pour l'enlever.</li><li>- Tournez le siège dans sa position de déplacement.</li><li>- Contactez le fournisseur.</li></ul>